

## Notas para el encargado de la toma de muestras de la prueba de Papanicolau ThinPrep®

### Preguntas frecuentes

#### ¿Qué debo hacer si se cae el vial?

Si el vial se cae después de haber tomado la muestra, obsérvelo y compruebe si queda líquido en el mismo. Si queda aproximadamente un tercio del líquido en el vial, todavía puede enviarlo al laboratorio para su procesamiento. Incluya una nota en el formulario de solicitud para informar al laboratorio acerca del derrame de la muestra. No 'rellene' el vial con el contenido de otro vial, el laboratorio realizará los ajustes de nivel necesarios.

#### ¿Puedo tomar una muestra ThinPrep si la paciente está menstruando?

No. Las muestras perimenstruales deben evitarse.

#### ¿Puedo utilizar el cepillo Cervex si hay estenosis del orificio?

Puede usar el cepillo Cervex, no obstante también puede utilizar un cepillo endocervical, según decida el profesional sanitario. Ambos instrumentos de toma de muestras se deben enjuagar en el mismo vial del paciente.

#### ¿Puedo utilizar el cepillo Cervex para tomar muestras de la cúpula?

Puede utilizar el cepillo Cervex para tomar muestras de la cúpula aplicando un movimiento de barrido.

#### ¿Puedo utilizar el cepillo Cervex si hay una zona amplia de ectropión?

Sí, puede utilizar el cepillo Cervex si hay una zona amplia de ectropión. Recoja la muestra aplicando un movimiento de barrido circular.

#### ¿Puedo utilizar un lubricante?

No utilice ningún lubricante, ya que puede interferir con el proceso de la prueba de Papanicolaou ThinPrep.


#### ¿Debo tomar otra muestra para la prueba del virus del papiloma humano (VPH)?

No, las pruebas del VPH se pueden realizar con el mismo material recogido para la prueba de Papanicolaou ThinPrep.



## Protocolo


- Prepare todo el equipo antes de iniciar el procedimiento.
- Anote la fecha de caducidad en el vial de recogida de la muestra. No utilice viales caducados.
- Asegúrese de retirar por completo la funda de plástico de la tapa del vial y tírela.
- Introduzca los detalles del paciente en el formulario de solicitud y en el vial. Si no se incluyen los detalles en el vial, es posible que se devuelvan los especímenes.
- Quite la tapa del vial antes de tomar la muestra.
- No utilice ningún lubricante, ya que puede interferir con el proceso de la prueba de Papanicolaou ThinPrep.

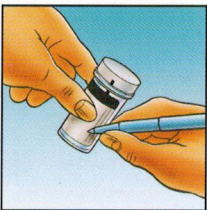

### Registre...


El nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento en el vial.

La información del paciente y el historial médico en el formulario de solicitud de citología.

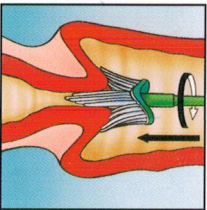


### Obtenga...

Una muestra adecuada del cuello uterino usando un cepillo Cervex (un dispositivo con forma de escobilla). Introduzca las cerdas centrales del cepillo en el canal endocervical con la suficiente profundidad para que las cerdas más cortas puedan estar totalmente en contacto con el ectocervix. Empuje ligeramente y gire el cepillo 5 veces en sentido horario.

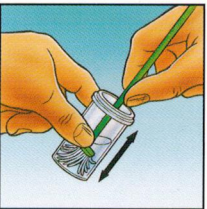


### Enjuague...

Inmediatamente el cepillo Cervex en el vial de solución PreservCyt, empujándolo contra el fondo del vial 10 veces, de forma que las cerdas se separen. Como paso final, gire vigorosamente el cepillo para liberar más material. Inspeccione visualmente el cepillo Cervex para garantizar que no haya quedado pegado ningún material. Deseche el dispositivo de recogida. **No deje la cabeza del cepillo Cervex en el vial.**

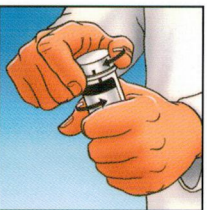

### Apriete...

El tapón de forma que la línea de torsión del mismo sobrepase la línea negra de torsión del vial. No apriete demasiado.

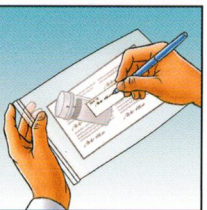

### Coloque...

El vial y la solicitud en una bolsa para muestras para su transporte al laboratorio.

## Correcto

Si hay un exceso de mucosidad, debe retirarla cuidadosamente antes de tomar la muestra

Utilice solamente el cepillo Cervex (un dispositivo de tipo escobilla) o en combinación con una espátula de plástico o un cepillo endocervical

Debe girar el cepillo Cervex 5 veces en sentido horario. La espátula de plástico debe girar 360 grados y el cepillo endocervical debe dar de un cuarto a media vuelta

Enjuague de inmediato el material recogido en el vial

Vuelva a colocar la tapa y apriétela de forma que la línea de torsión del tapón sobrepase la línea negra de torsión del vial para evitar fugas

No pegue etiquetas en la parte sin etiquetar del vial de muestra para que se pueda ver el contenido

Si se utilizan etiquetas de código de barras, péguelas horizontalmente en torno al vial

Las muestras deben enviarse al laboratorio inmediatamente

## Incorrecto

**NO** limpie rutinariamente el cuello uterino ni tome muestras cervicales con torunda antes tomar una muestra cervical

**NO** utilice un cepillo endocervical aisladamente

**NO UTILICE**, bajo ninguna circunstancia, una espátula de madera

**NO** utilice lubricante

**NO** deje el dispositivo de recogida en el vial mientras atiende al paciente

**NO** apriete demasiado la tapa en el vial

**NO** desmonte la cabeza del cepillo Cervex en el vial

**NO** coloque varias etiquetas en la parte exterior del vial

**NO** pique verticalmente las etiquetas de código de barras en el vial

**NO** utilice viales caducados

**NO** retrase el envío de los viales al laboratorio.